

Kurzanleitung Reinigung

Patent



1
Bringen Sie das Chirurgie Set in den Reinigungsraum



2
Sammeln Sie die verwendeten Bohrer und reinigen Sie sie ordnungsgemäß



3
Alle Bohrer in die Reinigungsflüssigkeit legen



4
Alle Bohrer müssen mit Flüssigkeit bedeckt sein




5
Stellen Sie die Metallschüssel ebenfalls in die Flüssigkeit...



6
...den Deckel in die Flüssigkeit legen



7
Der Deckel muss mit Flüssigkeit bedeckt sein

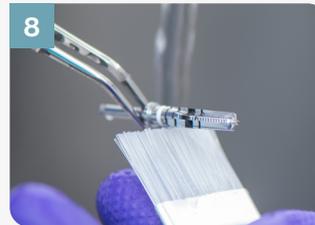

8
Reinigen Sie die Bohrer mit einer Bürste



9
Trocknen Sie die Bohrer



10
Legen Sie die Bohrer auf ein trockenes Tuch



11
Legen Sie alle Teile in das Chirurgie Kit



12
Zur Sterilisation bitte einpacken



13
Luftdicht verschweißen



14
In den Sterilisator legen



15
Starten Sie das Sterilisierungsprogramm



Montage des Chirurgie Kit

