## Guida Rapida detersione e sterilizzazione

## Patent >



Trasferire il Kit Chirurgico nella sala addetta alla detersione



Sistemare le frese utilizzate e pulirle accuratamente



Immergere tutte le frese nel liquido detergente



Tutte le frese devono essere interamente coperte dal liquido



Immergere nel liquido anche la vaschetta metallica



Immergere il vassoio nel liquido



Il vassoio deve essere interamente coperto dal liquido



Pulire le frese con uno spazzolino



Asciugare le frese



Appoggiare le frese su un panno asciutto



Ricollocare nel vassoio tutti i componenti



Imbustare per la sterilizzazione



Saldare per rendere la busta ermetica



Inserire nella sterilizzatrice



Avviare il programma di sterilizzazione



## Composizione del kit chirurgico

